

# 퀵 가이드: Cyclo G6® 레이저 스윙 관리 소프트웨어 및 MicroPulse P3® 전달기기 사용하기\*





키를 "ON" (켜기) 으로 돌립니다. 초기화가 완료될 때까지 기다립니다. MicroPulse P3 프로브를 연결합니다.

**4** 치료 매개변수 설정하기  
Preset (프리셋) 메뉴를 사용하거나 수동으로 입력하여 매개변수를 설정합니다.


프리셋 옵션

수동 옵션

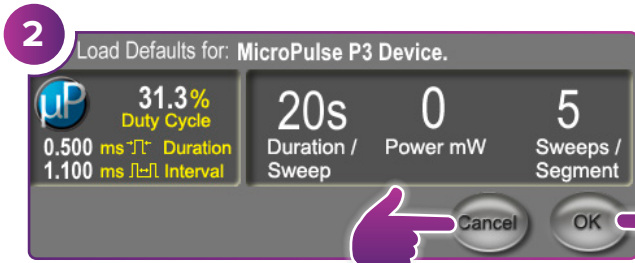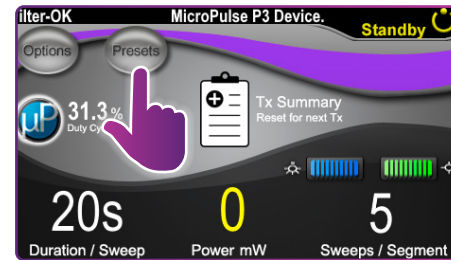

새 매개변수를 설정하려면 "OK" (확인) 를 선택합니다. 팝업 화면이 나타납니다(3단계).

이전 치료에서 사용한 매개변수를 유지하려면 "CANCEL" (취소) 을 선택합니다. 팝업 화면이 나타납니다(3단계).

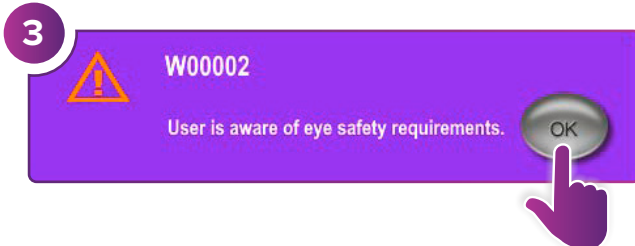


"OK" (확인) 를 누릅니다. 새 매개변수를 설정하려면 4단계로 이동합니다. 매개변수를 유지하려면 5단계로 이동합니다.




뒷면의 추가 단계 참조



\* 치료를 전달하기 전에, 안전성, 경고, 주의사항을 비롯한 전달 지침은 "사용자 가이드: MicroPulse TLT용 Cyclo G6 소프트웨어 업그레이드", "Cyclo G6 레이저 시스템 사용 설명서", "MicroPulse P3 전달기기 사용 지침"을 참조하십시오.

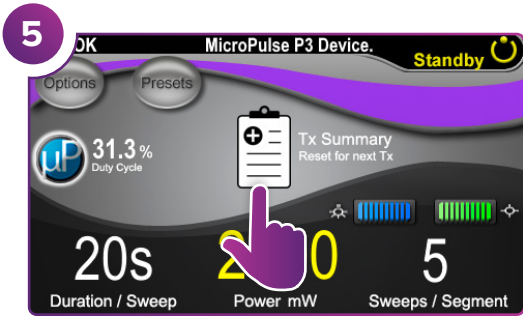

“Tx Summary” (치료 요약) 를 선택합니다.

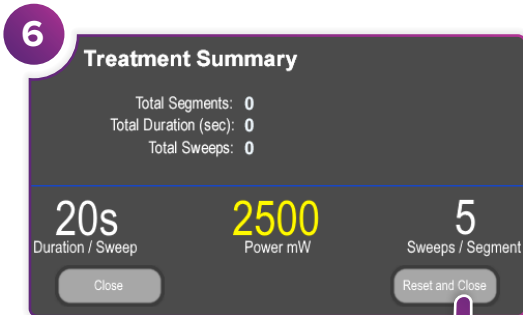


“Total Segments” (합계 구역),  
 “Total Duration” (합계 시간),  
 “Total Sweeps” (합계 스위프) 값이 0으로  
 재설정되었는지 확인합니다.




이 버튼을 누르면 Treat  
 (치료) 모드(레이저  
 활성화)로 들어갑니다.





치료 완료 시 이 버튼을 눌러  
 Standby (대기) 화면(레이저  
 비활성화)으로 들어갑니다.

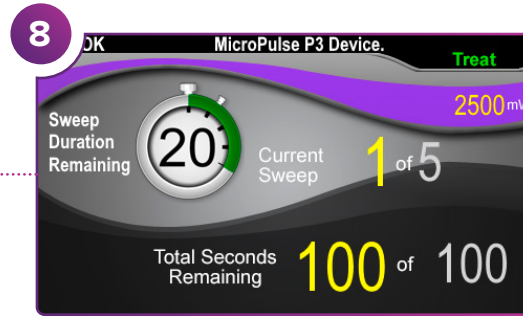


원하는 구역으로 치료를 전달합니다.

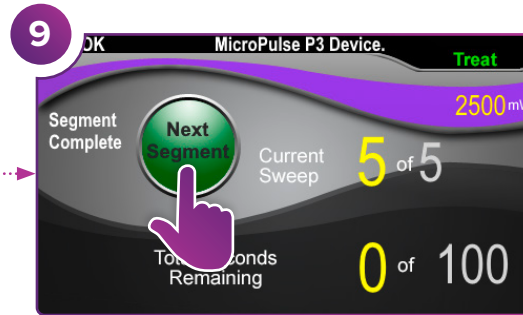

버튼을 눌러 값을 재설정합니다. 다음 구역을  
 치료하려면 8단계를 반복합니다. 치료가 완료되면  
 10단계로 진행합니다.

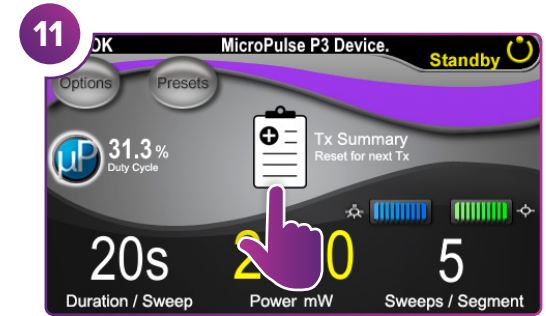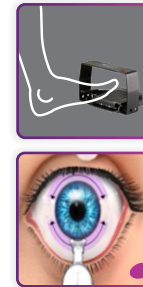


버튼을 눌러 치료 요약 화면을 봅니다.

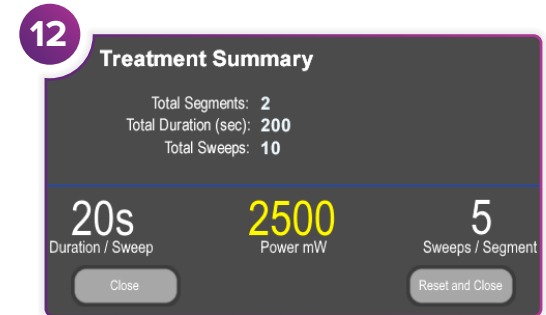

치료 요약을 검토합니다.



치료 정보를 기록합니다.

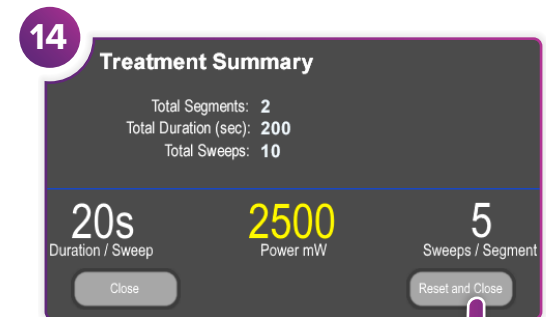

다음 치료를 위해 재설정합니다.



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com  
 © 2022 Iridex. 모든 권한 보유. Iridex, Iridex 로고, MicroPulse,  
 MicroPulse P3, Cyclo G6은 Iridex의 등록 상표입니다.  
 88305-KO.A 02.2022



CE 2797

EC REP

Emergo Europe  
 Prinsessegracht 20  
 2514 AP The Hague  
 네덜란드

